

## Gebruiksaanwijzing van de ClearMask™ EZ-Adjuster




### Stap 1

Was de handen met water en zeep, of gebruik een desinfectiemiddel.




### Stap 2

Haal een enkele ClearMask™ uit de verpakking en verwijder de beschermende folie van de buitenkant van het masker. Controleer het masker op beschadigingen en besmetting. Gebruik het masker niet als er tekenen zijn van beschadiging of besmetting.

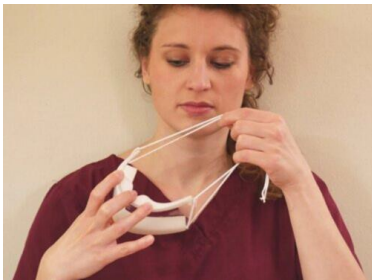


### Stap 3

Houd het masker tussen de vingertoppen vast met de foamszijde naar het gezicht en de neusuitsparing aan de bovenzijde. Plaats het masker tegen het gezicht zodat de neus in de neusuitsparing valt en de onderste foamlaag op de kin rust.

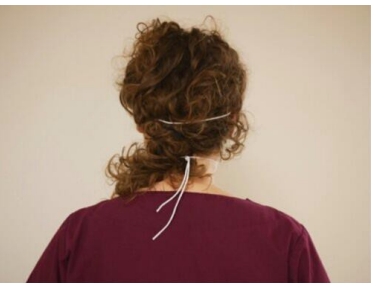


### Stap 4

Pak met de andere hand zowel het bovenste als onderste elastische koord en plaats deze over het hoofd. Het bovenste koord komt boven de oren en het onderste koord gaat onder de oren. Laat de koorden elkaar niet kruisen.

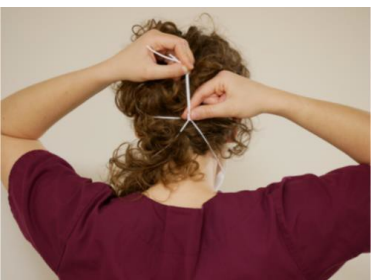

### Stap 5

Gebruik de EZ-Adjuster aan de achterzijde om het masker strakker of lossler op het hoofd te plaatsen.

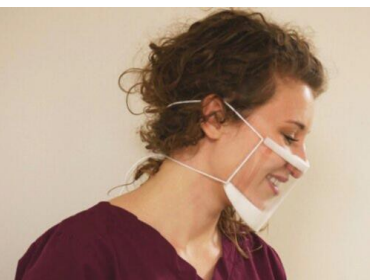


### Stap 6

Controleer een juiste pasvorm en zorg ervoor dat het foam goed contact maakt met het gezicht.




Scan mij voor de  
instructie video

## Verwijderen van de ClearMask™ EZ-Adjuster

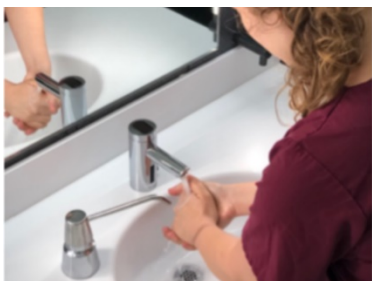


### Stap 1

Was de handen met water en zeep, of gebruik een desinfectiemiddel.

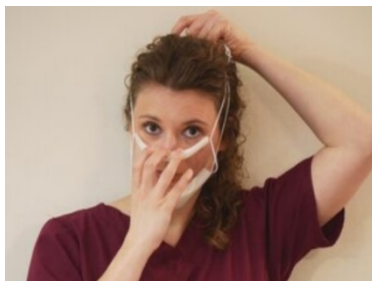

### Stap 2

Verwijder de ClearMask™ door deze met de vingertoppen vast te houden en de koorden over het hoofd te trekken. Maak de koorden eerst wat losser met de EZ-Adjuster indien nodig.

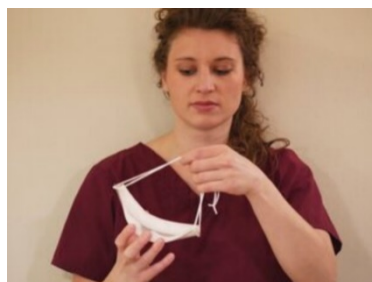

### Stap 3

Verwijder de ClearMask™ langzaam van het gezicht. Vermijd contact met de voorkant van het masker en eventuele spetters op het masker.

### Stap 4

Gooi het masker weg in een daarvoor bestemde afvalbak.



Distributeur: MediMast BV  
Prinses Marijkelaan 11  
2635JH Den Hoorn  
Nederland  
[www.medimast.nl](http://www.medimast.nl)  
[info@medimast.nl](mailto:info@medimast.nl)