

# Hoe **THE CARPAL SOLUTION**<sup>™</sup> werkt

**6 weken therapie**  
- gebruik 1 per nacht -



Het rondje wordt uitgerekt tot een ovaalvorm als de juiste kracht wordt uitgeoefend.



Gedurende het slapen wordt er zacht getrokken aan drie 'sleutelpunten'.

**Verlichting van de klachten bij milde gevallen van CTS treedt meestal binnen enkele dagen op. Bij gematigde CTS duurt dit een week en bij chronische CTS tot drie weken.**

Zachte decompressie van het zachte weefsel gedurende de slaap, gecombineerd met actief gebruik gedurende de dag resulteert in een ideale therapie voor verlichting van CTS symptomen zonder spierafname of bijwerkingen. De Carpal Solution Therapie verbetert de bloedcirculatie in de hand. Dr. Morgan, dokter en uitvinder van de Carpal Solution, legt uit dat een toegenomen, voedingsrijke doorbloeding de hand op een natuurlijke wijze versterkt en bijdraagt aan een snel herstel van de hand. Voor een blijvend resultaat is het nodig de therapie de totale zes weken te volgen.

#### Symptomen Carpaal Tunnel Syndroom

- pijn in de hand en pols
- pijnuitstraling in de onderarm
- verdoofd gevoel van de hand
- krachtsverlies van de hand
- tintelingen in de vingers
- slaaponderbrekingen

Als u een combinatie van deze symptomen heeft, is er een kans dat u lijdt een (een lichte vorm van) CTS. Een snelle diagnose en behandeling met de Carpal Solution kan een verdere verslechtering voorkomen en kan de symptomen verminderen of laten verdwijnen. Consulteer een arts of specialist voor een juiste diagnose. Wacht hier niet mee en pak uw symptomen direct aan.

De Carpal Solution is hypoallergeen en latex-vrij. Het wordt zelf aangebracht in drie eenvoudige stappen. Gebruiksvriendelijke aanwijzingen en instructies vindt u aan de binnenzijde.

*Disclaimer: Hoewel resultaten bij individuen zijn ervaren zoals hierboven genoemd stelt First Hand Medical in geen geval dat alle patiënten hetzelfde zullen reageren als gevolg van de verschillen in de oorzaken van genoemde symptomen. Als de symptomen aanhouden raadpleeg dan uw arts of specialist.*

**Medical Classification:**  
WHF Orthosis

Patented Medical Device  
Copyright MediMast BV

**GEEN INJECTIES – GEEN STIJVE SPALKEN – GEEN OPERATIE**

## THE **CARPAL SOLUTION**<sup>™</sup>

RECHTS en  
LINKS

*Active Hands for Life*

Natuurlijke  
therapie  
bij CTS

- Eenmalig gebruik
- Dragen tijdens uw slaap
- Vermindert pijn binnen enkele dagen
- Verbeterd uw nachtrust
- Stopt tintelen vingers
- Voorkomt verloren tijd
- Comfortabel
- NIET immobiliserend
- Gepatenteerde therapie
- Ontwikkeld door dr. Clyde Morgan
- Klinisch gedocumenteerd



[www.mijncarpaletunnel.nl](http://www.mijncarpaletunnel.nl)

US FDA Geregistreerd  
Hypoallergeen

Medical Classification:  
WHF Orthosis



# Zes weken therapie

## Bevat 28 disposable plakkers

Draag elke nacht een plakker gedurende de eerste twee weken, gevolgd door om de nacht gedurende de volgende vier weken. De pro-actieve Carpal Solution Therapie stopt de symptomen terwijl u slaapt.

### Wat als de symptomen terugkomen?


Als de condities die hebben geleid tot het Carpale Tunnel Syndroom blijven bestaan, kunnen de symptomen na enige tijd weer terugkomen. In deze gevallen raadt dr. Morgan de Carpal Solution Onderhouds Therapie aan. U draagt de Carpal Solution dan één nacht per week.

**NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK:** in de buurt van open wonden, als allergische reacties optreden, bij huidafwijkingen en bij botafwijkingen. Niet gebruiken om symptomen te verminderen die een gevolg zijn van Auto Immune Disorders, artritis, diabetes, jicht, hypothyroidie, menopauze, polsfracturen en dislocaties. Als zich een huidallergie ontwikkelt, stop het gebruik en raadpleeg een arts. De aansprakelijkheid van First Hand Medical voor claims zal in geen geval groter zijn dan het bedrag dat de klant voor het product heeft betaald. Kijk op [www.mijnarpaletunnel.nl](http://www.mijnarpaletunnel.nl) voor meer informatie. Voor een accurate diagnose en het beste resultaat met de Carpal Solution, dienen mensen met de beschreven symptomen een arts te raadplegen.

[www.mijnarpaletunnel.nl](http://www.mijnarpaletunnel.nl)

## 3 stappen naar verlichting

Voor het naar bed gaan, plaats als volgt:

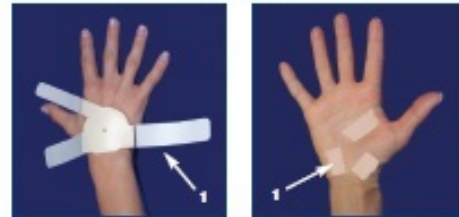

**Stap 1:** Plaats de eerste strip onder de pink en bevestig deze op de grens van de palm van de hand en de pols. Kort indien nodig de strip in om overlap met de andere strips te voorkomen.



**Stap 2:** Plaats de tweede strip onder de duim op de palmaire zijde. De juiste tensie is bereikt als het ronde gaatje in het midden van het elastische middenstuk een ovale vorm heeft. De diameter van de ovaal moet 1,5 keer zo groot zijn als die van het rondje. Kort indien nodig de strip in om overlap met andere strips te voorkomen.



**Stap 3:** Plaats de derde strip tussen duim en de wijsvinger zoals aangegeven. Kort indien nodig de strip in om overlap met andere strips te voorkomen. Verzekert u ervan dat er geen overlap is van de strips aan de palmaire zijde van de hand.

Verwijder de strips 's ochtends en probeer de hand normaal te gebruiken gedurende de dag om de spierontwikkeling te stimuleren.

**VOORKOM TE STRAK PLAATSEN**  
Zachte, constante oprekking  
is de sleutel

# THE CARPAL SOLUTION™

### Wanneer resultaat?

De Carpal Solution biedt vaak binnen enkele dagen verlichting van de ernstigste klachten die veroorzaakt worden door het Carpale Tunnel Syndroom (CTS). In veel gevallen keert snel een goede nachtrust terug. Na een behandeling van het zachte weefsel gedurende zes weken zal het resultaat optimaal zijn. Er zijn meer dan 15 verschillende factoren die bijdragen aan CTS, iedere patiënt reageert dan ook anders op de Carpal Solution. 80 % van de CTS-patiënten ervaart verlichting van de klachten en symptomen binnen een week na de start van de Carpal Solution Therapie. Voor 8 tot 12 % van de patiënten kan het tot twee weken duren voordat verlichting optreedt. Bij 4 tot 7 % van de patiënten duurt het drie weken alvorens de pijn significant vermindert.

### Waarom een protocol van zes weken?

Dr. Morgan zegt: "Hoewel patiënten vaak al totale verlichting van hun klachten ervaren voordat de hele behandeltermijn is verstreken, beveel ik aan om de volledige Carpal Solution Therapie van zes weken af te maken, om een maximaal en langdurig resultaat te bereiken. Het hervormen van het zachte weefsel is een geleidelijk proces dat zes weken in beslag neemt voor een maximaal resultaat. De complete zes weekse Carpal Solution Therapie bestaat uit het 's nachts dragen van de Carpal Solution gedurende de eerste twee weken gevolgd door om de andere nacht gedurende de volgende vier weken."

Het ronde gaatje geeft de juiste tensie aan als deze opgerekt wordt tot een ovaalvorm.

Het overlappen van de plakstrips aan de palmaire zijde van de hand gaat de trekkende werking tegen en zorgt ervoor dat de Carpal Solution niet werkt.

### Correctie carpale banden

Een paar gebruikers, zoals die patiënten die reeds een nachtsplak hebben gebruikt, hebben een toegenomen ongemak ervaren gedurende de eerste drie of vier dagen tot zelfs drie weken van de Carpal Solution Therapie voordat verlichting van de CTS klachten werd bereikt. In deze gevallen kunnen CTS patiënten baat hebben bij pijnmedicatie gedurende deze korte periode van aanpassing van de carpale banden. CTS patiënten laten weten dat de blijvende klachtenverlichting, de korte periode van ongemak meer dan waard is. Patiënten die pijnmedicatie gebruiken dienen altijd de aanwijzingen op de verpakking of het advies van hun arts te volgen.

De geperforeerde plakstrips zorgen voor een goede ademning en een goede pasvorm bij iedereen.

Copyright QuaMedical

Zes weken Therapie  
28 nachtelijke behandelingen